

ULTIMATE COMPASS

美しいボデイレインと健やかな素肌へ

COPPASS SIRIESE
コンパス・シリーズ

「部分痩身 × 体質改善トリートメント」
目的別に開発された、総合美容の最新マシン

～ 広域周波数 × 干渉波EMS ～

ULTIMATE COMPASS -アルティメットコンパス-
Professional Skin & Body Care

～広域周波数 × 干渉波EMS～



低周波から高周波まで広い範囲で周波数を選択 × 干渉波EMSで
リンパドレナージュから筋肉強運動までフルカバーで効果を実感!!

5KHz～80KHzまでの広い範囲での周波数を選択でき、皮膚表面に近いリンパドレナージュから、深い筋肉層まで幅広くケアしていきます。マニュアルモードでは、刺激時間×休息时间をお客様の体調や目的に合わせて様々な設定ができますので、より短時間で効果的なトリートメントを行えます。また、10チャンネルの多極機器になりますので、全身をフルカバーできます！腹筋や広背筋、大腿直筋などの大きな筋肉には、2極の組合せにより干渉しあう領域に干渉低周波が発生します。効率良く、筋肉に対して十分な刺激を与えることにより、高いパフォーマンスを実現します。

ULTIMATE COMPASS の特長 Feature


①広域周波数であらゆるトリートメントに対応！

5Hzから最大40KHzまでの周波数を選択することができ、またインパクト（電流を流す時間）とブレイク（休憩）を一人ひとりに合わせて調節することにより、理想の筋肉刺激を生み出すことが可能です。これまでのEMSとは異なり、しっかりと通電する金属パッドを使用していくので、体感は優しく刺激の少ない波形でプログラムしているため、どなたでも心地よくご使用いただけます。

②金属プレートによる通電効率のUP！効果UP！！

ULTIMATE COMPASSの金属プレートは、お肌の上に直接セットすることができます。直接お肌に触れさせることによって、通電の効率が格段に良い状態を保てるので、筋肉への刺激もリンパケアも効果の実感が違います。また、直接水洗いでき、劣化しにくいので長期にわたって安全に使用していただくことができます。もちろん、補水カバーもついておりますので、お客様のお好みに合わせて、布地にはさんで使用していただくことも可能です。

金属パッド

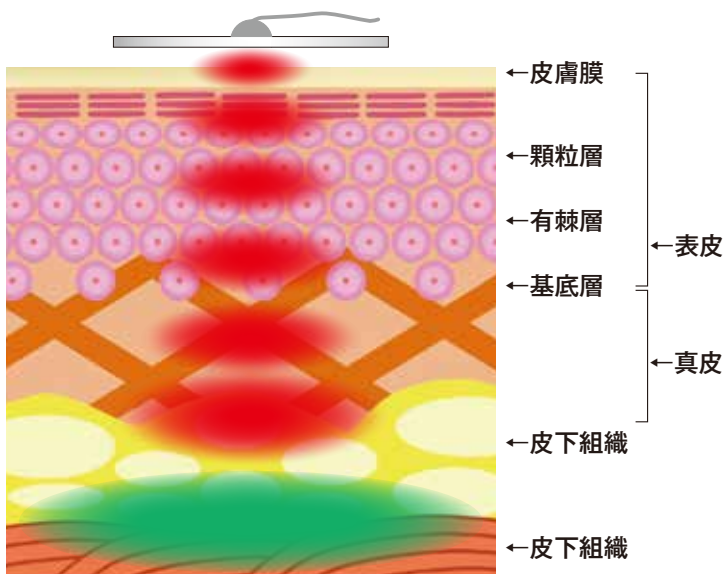


③干渉波ケアで深層筋肉や脂肪燃焼運動を効率的に！

干渉波とは、生体内で電流を交差させることにより、互いの電流に干渉し合う2極の波形を発生させ、より深部へ、より広範囲へケアをしていくことを目的としています。ULTIMATE COMPASSは業務用の中でも、10チャンネルとパッドを設置できる数が多いので、全身くまなく干渉波電流でケアしていくことができます。なかなか痩せにくい方や筋肉を効率よく燃焼させて、冷えむくみ肩こりなどの体質も改善していきたい方には、とてもおすすめのトリートメントです！



コンパスシリーズ／軽量コンパクトボディ 「シンプルなデザイン」×「シンプルな操作」

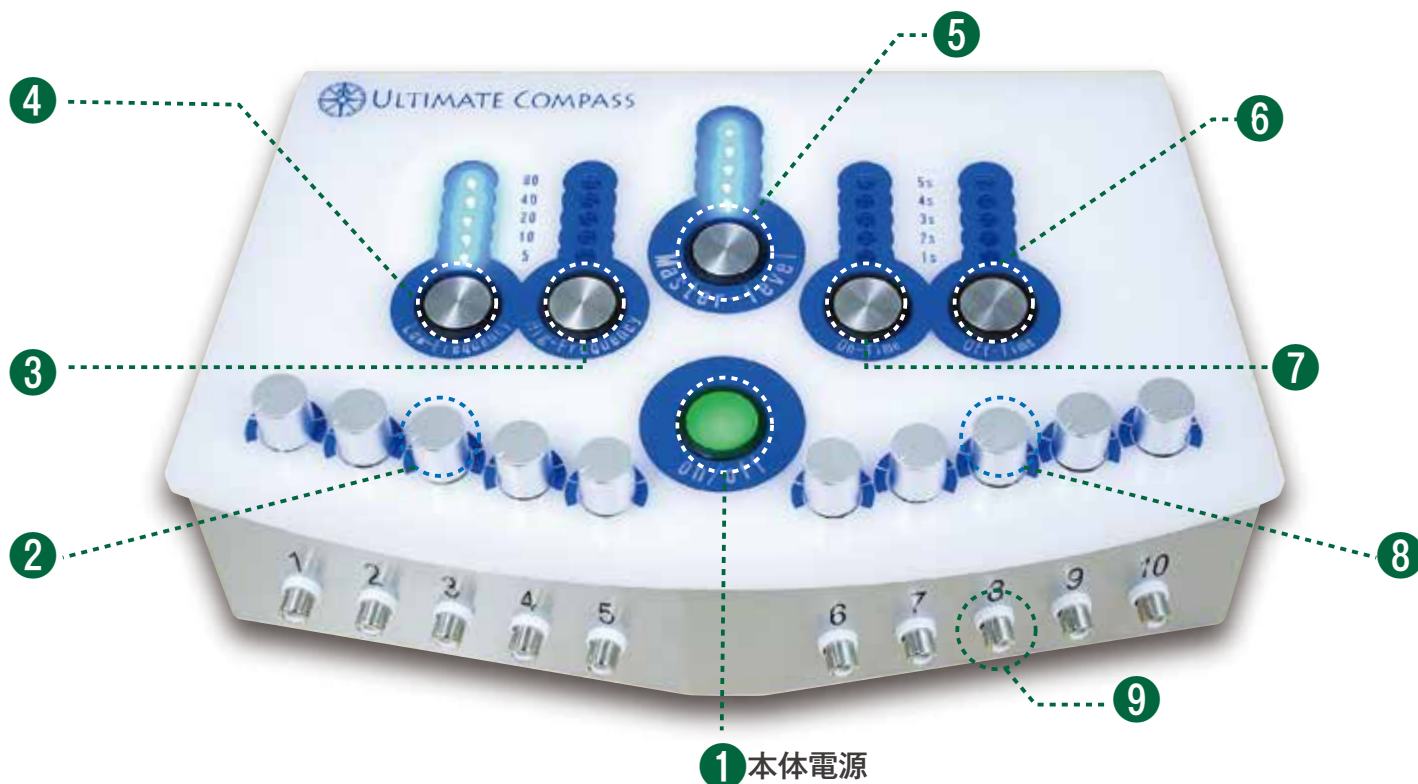

1 本体電源



「固定ベルト」
金属パッド(右写真の円形の金属板)を身体に固定するベルトです。(下写真の施術例を参照下さい)



「金属パッド」と「補水カバー」
皮膚に直接または補水カバーをあてて装着します。その時、補水カバーは水分を含ませることで通電効率がアップします。

ULTIMATE COMPASS の器機効果 Result

モード	内 容
Low Frequency(低周波)マニュアル	筋肉表面から深層筋肉までの刺激、脂肪燃焼運動
High Frequency(高周波)マニュアル	筋肉のほぐし、リラクゼーション、ドレナージュ
Low Frequency(低周波)オートモード	ULTIMATE(究極)モード開発中!!!
High Frequency(高周波)オートモード	ULTIMATE(究極)モード開発中!!!


※【マニュアルモード】ON TIME / 電気が流れている時間の調整OFF TIME / 電気の流れを止めて休んでいる時間の調整



ULTIMATE COMPASS

付属品一覧

- ① ULTIMATE COMPASS本体
- ② 接続ケーブル
- ③ パッドコード
- ④ 固定ベルト
- ⑤ 補水カバー
- ⑥ ACアダプター
- ⑦ 取扱説明書・保証書

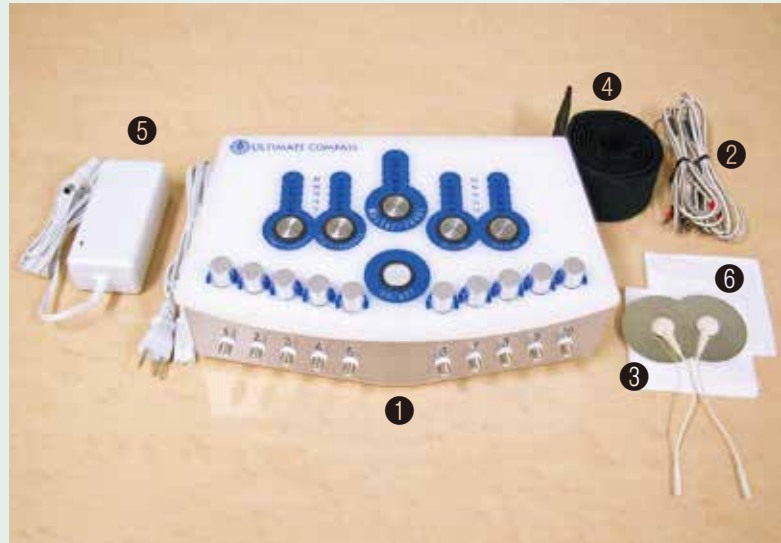

商品詳細

品名	ULTIMATE COMPASS
本体寸法	(約)幅300mm×奥行180mm×高さ80mm
重量	約3.3Kg(本体)
電源	100V 50/60Hz
消費電力	50W
周波数	5~40MHz
サロン価格	750,000(税別)

※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※製品の色は写真と若干異なる場合がございます。

販売店

発売元 株式会社メディカ ボーテ

〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル

TEL:03-5573-4531 FAX:03-5573-4530

Mail info@medicabeaute.co.jp

info4@medicabeaute.co.jp